

FIG-NR. / FIG-NO.

PRODUKTINFORMATIONEN / PRODUCTINFORMATIONS

LUS85

LUSTER® FOR ZIRCONIA (EXTRAORAL)

LUS91

LUSTER® FOR ZIRCONIA (INTRAORAL)



Die Instrumente dieses LUSTER®-Sets sind speziell für die Bearbeitung von Zirkonoxid-Keramiken entwickelt worden. Sowohl das Labor-Set für extraorales Arbeiten (LUS85), als auch das Praxis-Set für intraorales Arbeiten (LUS91) bestehen aus einem 2-Stufen-Poliersystem, welches ganz ohne Polierpaste angewendet werden kann und im Ergebnis durch exzellenten Hochglanz überzeugt. Neben den hochwertigen Diamantpolierern enthält das System weitere Instrumente zum Beschleifen von Kontaktpunkten oder -flächen. In hochwertigen Bohrerständen werden die Instrumente gut organisiert und können nach der Anwendung bequem sterilisiert werden. Durch die Bearbeitung von Zirkonoxid mit diesen speziellen Schleifern und Polierern erhält das Material außergewöhnlich glatte Oberflächen und maximalen Glanz.

The instruments of this LUSTER® Set have been specially developed for use on zirconium oxide restorations. Both, the laboratory set for extraoral work (LUS85) as well as the practice set for intraoral work (LUS91), consist of a two-stage polishing system that can be used entirely without polishing paste and produces an excellent high gloss finish. Besides the high quality diamond polishers the system contains further instruments for adjusting contact points or areas. The instruments are well organized in high quality bur blocks that can be conveniently sterilized after use. The result of processing zirconia using these special abrasives and polishers, produce amazingly smooth surfaces and an exceptionally high gloss to the materials.

VORTEILE BENEFITS

- Materialschonende Bearbeitung von Zirkonoxid
- Spezielle auf Zirkonoxid abgestimmte Bindungshärte für makellose Oberflächengüte
- Exzellente Hochglanzergebnisse nach kürzester Bearbeitungszeit
- Hohe Standzeiten
- Material saving processing of zirconia
- Special matched bonding hardness for flawless surface finishing
- Excellent glossy results after short working time
- Long service life

SORTIMENTE/
ASSORTMENTS®



Anwendungsvideo
Application Video

Meisinger
since
1888

ANWENDUNG APPLICATION



9736H: Beschleifen des Kontaktpunktes. Empfohlene Drehzahl: 8.000 – 12.000 min⁻¹
Trimming the contact points, Recommended rotary Speed: 8.000 – 12.000 rpm



DCA04: Gezieltes Glätten der Okklusalfäche. Empfohlene Drehzahl: 7.000 – 12.000 min⁻¹
Smoothing of the occlusal surface, Recommended rotary Speed: 7.000 – 12.000 rpm



DCA06: Glätten der Außenform. Empfohlene Drehzahl: 7.000 – 12.000 min⁻¹
Smoothing of the external shape, Recommended rotary Speed: 7.000 – 12.000 rpm



DCA10: Hochglanzpolitur der Okklusalfäche mit geringem Anpressdruck. Empfohlene Drehzahl: 7.000 – 12.000 min⁻¹
High gloss polishing of the occlusal surfaces with low contact pressure. Recommended rotary Speed: 7.000 – 12.000 rpm



DCA12: Hochglanzpolitur der Außenform. Drehzahl: 7.000 – 12.000 min⁻¹
High gloss polishing of the external shapes, Recommended rotary Speed: 7.000 – 12.000 rpm




Vorher - Nachher:
Hochglanzergebnisse mit den MEISINGER Luster® Kits
Before and After:
High gloss results with MEISINGER Luster® Kits

BEWERTUNG RATING


Dental Advisor Award 2014
Dental Advisor Award 2015
Solver 2014

Oberflächenrauheits-Test Surface roughness test

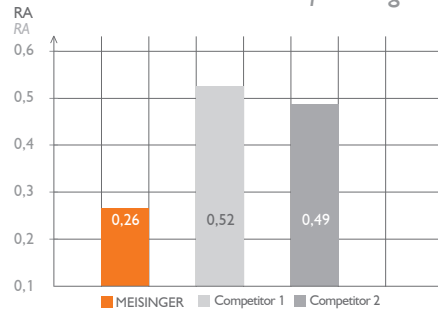

Im Vergleich mit den Wettbewerbsprodukten zeigt die Materialoberfläche nach der Politur mit MEISINGER Instrumenten ein signifikant besseres Ergebnis.
The material surface after polishing with MEISINGER instruments shows a significantly better result than with competitor products.

Reflexions-Test Reflection test

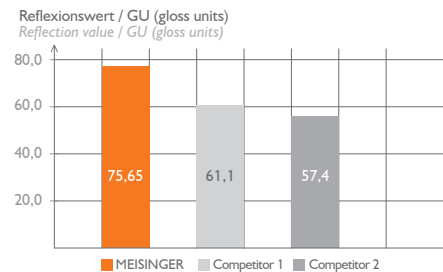

Im Reflexions-Test liegen die MEISINGER Polierer mit einem hervorragenden Ergebnis klar auf Platz 1 und lassen die Wettbewerber deutlich hinter sich.
In the reflection test, the MEISINGER polishers are clearly in 1st place with an outstanding result and leave the competitors way behind.